


ウォーターウェア (BTE) SONNET・OPUS用 ユーザーマニュアル

ご使用前に必ず**P.4の安心してお使い頂くためのご注意点**をご一読ください。
いつもご使用の**空気亜鉛電池は使用できません**のでご注意ください。



写真はSONNETの装着図

取り付け前の注意点

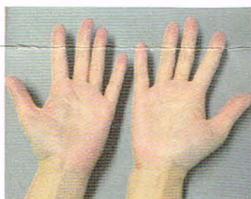


手が濡れていないか、汚れていないか、爪が尖っていないかを確認する。




シールの粘着力が弱まるため、ハンドクリームは塗らない。



手が濡れている場合は乾いた布でしっかり拭く。

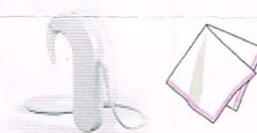

プロセッサの汚れや汗等は柔らかい乾いた布でいねいに拭き取る。ウォーターウェアが無水エタノールに弱いので、汚れ取りに使用しない。

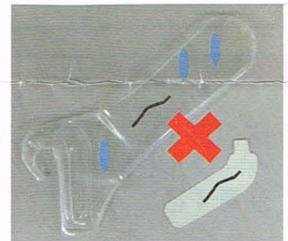

破損した場合、使用しない。特に再使用时は注意して確認する。(シールは再使用不可)

ご用意頂くもの




アルカリボタン電池 DaCapo充電電池 空気亜鉛電池



SONNETでは酸化銀電池又はアルカリボタン電池を使用する。OPUSはDaCapo充電電池も使用可。**空気亜鉛電池は使用不可。**
※詳しくはP.4参照



ウォーターウェア本体とシール(写真は台紙に付いた状態)

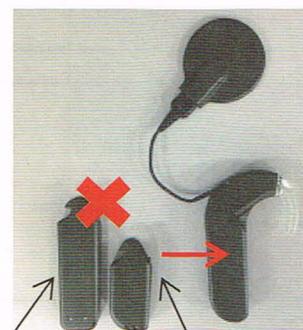

オーディオバッテリーカバー XSバッテリーユニット

SONNET・OPUS共オーディオバッテリーカバー使用不可。OPUSのXSバッテリーユニットも使用不可。
※4ページ目の注意点参照

はじめのご注意点

送信コイルの挿入向きは、**左右で異なります**。

写真の向きでの挿入例： 右耳：コイルの**裏面**が上向き

左耳：コイルの**表面**が上向き

- 左右を逆に入れてしまった場合は、破損に気を付けながらスリーブの中でコイルを表裏逆に回転させます。

各パーツ名称




取り付け方

- 本体は1枚につき最大3回使用可。シールは単回使用。
- 写真はすべてSONNETオーディオプロセッサです。


電源

- ① 電源を入れる。
コイルチェッカーでチェック。

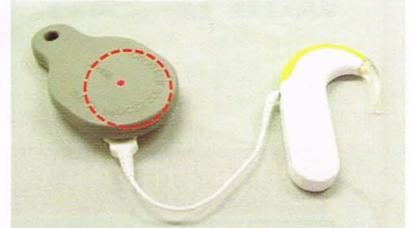

送信コイル

- ② 送信コイルをスリーブに挿入。
ケーブルを損傷させないように注意する。

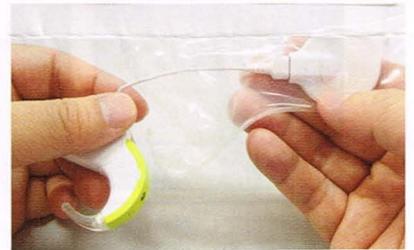

ケーブル

- ③ ケーブルをスリーブ奥まで入れる。
送信コイルが外れかかっていないかチェック。



イヤフック

- ④ イヤフック入れの奥までイヤフックを挿入。



バッテリーパック

- ⑤ バッテリーパック部を挿入。



全体

⑥プロセッサ全体が入ったら、
以下を確認

- フチにたるみがない。
- ケーブルがねじれていない、
引っ張られすぎていない。



シール

⑦本体下部から、開口部のフチ
に合わせてシールを少しずつ
貼っていく。
最後まで貼らずに一旦止める。



円形ループ
紛失防止用にRONDO用の
テグスとアタッチメント
クリップ等の取り付け可能。
強く引っ張るとウォーター
ウェアが破損する恐れが
あるのでご注意ください。

シール

⑧ウォーターウェア内部の空気
を押し出す。




シール

⑨シール全体を強めに
押し付け完全に貼り付ける。



紛失防止のために、
水泳帽を必ず着用する。

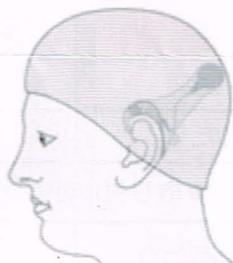

取り外し方

①取り外す前に、水滴や汚れを
乾いたハンカチ等で完全に
拭き取る。



②ウォーターウェアを破らない
ようにシールをはがす。
使用済シールは廃棄する。



③バッテリーパック下部、
イヤフック部、送信コイルの
順に取り外す



ウォーターウェア(SONNET・OPUS用)を 安心してお使いいただくためのご注意点

1. 使用可能なオーディオプロセッサ

SONNET及びOPUS専用

送信ケーブルは最長9.5cm迄使用可


オーディオバッテリーカバーは使用不可

OPUSで使用可能なバッテリーユニット(BU)

- DaCapo充電BU
- スタンダード型BU (ボタン電池3個)



オーディオ
バッテリーカバー

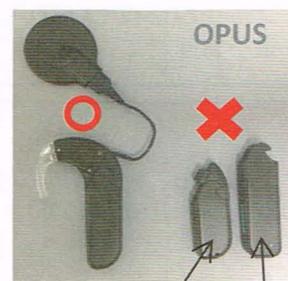

XSバッテリー
オーディオ
バッテリーカバー

2. 使用可能な電池

電池種別	電圧	型番	電池寿命目安
酸化銀電池 (SONNET:電池2個使用)	1.55V	SR44	8.5時間
アルカリボタン電池 (SONNET:電池2個使用)	1.5V	LR44	4.5時間
DaCapo充電電池 (OPUSの場合)	3.7V		最長16時間



アルカリボタン電池 DaCapo充電電池 空気亜鉛電池

- 電池の種類、製造メーカーによって電池寿命が異なります。
- OPUSご使用の場合は、**DaCapo充電電池**のご使用をお勧めします。
- ウォーターウェアは密閉する必要があるため、空気の供給を必要とする**空気亜鉛電池は使用不可**。

3. ウォーターウェア概要

	単位	本体	シール
内容量	1パック	3枚	9枚
最大使用可能回数	1枚あたり	3回まで	1回のみ
	● 取り付けから取り外しまでを1回と数える		
最長使用可能時間	1回使用あたり	最長電池寿命に準ずる	
完全に水に浸かった状態での最長使用可能時間	最長2時間 (本体1枚及びシール3枚を使用した計3回の使用における合計時間)		
使用可能な水環境	水道水、プールの水、海水で使用可 ● 温泉成分での性能試験は未実施		
使用可能な温度環境	ウォーターウェアを取りつけた状態で0～+50℃		

- 破損した場合はすぐに使用を中止してください。その場合**再使用は不可**。
- 破損により水分が入った場合でもオーディオプロセッサは通常の修理扱いとなります。
- 電池交換のために途中で取り付け直す必要がないよう、**ご使用時間に合わせてウォーターウェアをご使用下さい。取り付け直した場合、さらに1回使用したものと数えますのでご注意ください。**
- 詳細は**添付文書**をご参照ください。

ウォーターウェアの取り付け・取り外し方法はYouTube動画でもご確認いただけます。
YouTubeのトップページから、waterwearで検索します。

YouTube^{JP}

waterwear



SONNET Hands-On: Using WaterWear for SONNET-MED-EL

MED-EL

3か月前・視聴回数 2,647回

<http://www.medel.com/int/sonnet> Watch how to apply and use the WaterWear waterproof accessory for the SONNET Audio ...

4:31

CC