

SONNET DLコイル 概要

DLコイルの機能と特徴

<機能>

◆スリープモード

電源オン後、5分間非装着で自動的にスリープモードに移行(最大70%の省電力)
再度使用する際は、プロセッサの電源を一旦オフにしてからオンにします。


◆カップリングチェック機能

赤と緑のLEDインジケータライトの点滅によりコイルとケーブルの接続状態をお知らせ。

ケーブル断線疑いが見た目でわかります。プロセッサの電源をオンにし、コイルを頭部に装着した際に緑色のLEDが光ります。(★詳しくはDLコイルユーザーマニュアル参照)

★上記の機能を使用しない場合、マッピングのコンフィグ画面での非使用設定が必要。

デフォルトでは使用する設定になっています。

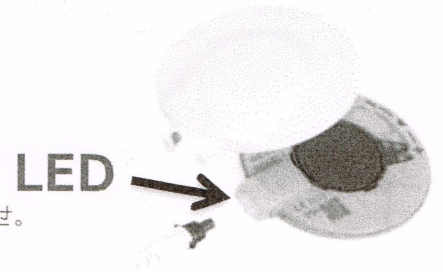

LED緑



オーディオプロセッサとインプラント間の通信が正常に行われている際の点滅パターン(インプラントによって異なる)

PULSAR SONATA CONCERTO		プロセッサの電源をONにし、コイルを頭部に装着した際、3回点滅。
C40+		プロセッサの電源をONにし、コイルを頭部に装着した際、1回点滅。

★DLコイルのLEDが光らない・・・
オーディオプロセッサが正常に作動していない可能性があります。
電池交換、ケーブル交換をお試しください。
また、マッピングで、光らない設定にしている場合もあります。

LED赤



オーディオプロセッサとインプラントが通信していない時の点滅パターン

- DLコイルが頭部から外れている。(機器に問題がなく、スリープモードの設定をしていれば、5分後にスリープモードになります) または、送信ケーブルの断線疑い。
 ... 最長5分間点滅し続ける
- スリープモード
 10秒おき プロセッサの電源をオフ、またはオンにし直すまで点滅し続ける

<特徴>

◆強化された送信ケーブル


DLコイルにはDLコイルケーブルを使用します(DコイルケーブルはDLコイルには使用不可)
基本キットには6.5cmのケーブルが付属しています。その他9cm、28cmのDLコイルケーブルを販売。

◆5種類の強度のマグネット

基本キット(2016年11月1日以降出荷分)には、**マグネット強度「3」**が付属しています。
マグネット強度「1」「2」「4」「5」をご希望の場合は、モデルにご連絡ください。★詳細は裏面を参照

強度3マグネットの強度調整

マグネットの取付け・取外し位置

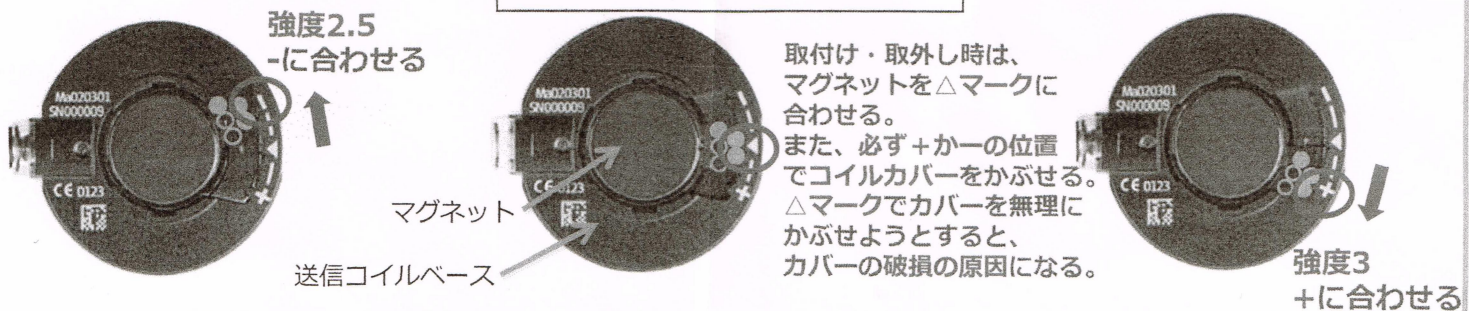

強度2.5-に合わせる

マグネット

送信コイルベース

取付け・取外し時は、マグネットを△マークに合わせる。また、必ず+か-の位置でコイルカバーをかぶせる。△マークでカバーを無理にかぶせようとすると、カバーの破損の原因になる。

強度3+に合わせる